

Gebrauchsanweisung

Befeuchtet und erfrischt strapazierte Augen

Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen

Herba-Vision®

Blaubeere

mit Hyaluronat

15 ml Augentropfen (Musterpackung: 5 ml)

Lösung zum Befeuchten und Benetzen der Augen mit 0,05 % Blaubeertinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, und mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat.

Herba-Vision® Blaubeere Augentropfen befeuchten und erfrischen müde, trockene oder strapazierte Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, Müdigkeit, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw. Herba-Vision® Blaubeere kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

Nicht geeignet zum Aufbewahren von Kontaktlinsen!

Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält
0,5 mg Natrium-Hyaluronat
0,5 mg Blaubeertinktur (HAB 2000)
0,001 mg Polyhexanid (Konservierungsmittel)
0,1 mg EDTA
2,5 mg HPMC (Methocel®)

Anwendung:

Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob die Flasche unversehrt ist, um Sterilität des Inhalts zu gewährleisten. Hände vor Gebrauch waschen und trocknen. Bei Bedarf 2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen.

Bitte diese Gebrauchsanweisung beachten.

Hinweise:

Bei Raumtemperatur lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Nach dem Öffnen 90 Tage haltbar.
Nicht nach Überschreiten des Verfallsdatums anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Im Fall einer Beschädigung das Fläschchen nicht verwenden. Tropfer- spitze nicht berühren. Achten Sie darauf, das Auge nicht mit dem Tropfer zu berühren, um Verletzungen oder Augeninfektionen zu vermeiden. Nach Gebrauch verschließen. Immer frische Lösung verwenden. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Stand der Information:

Juni 2015

Medizinprodukt

CE 0344



Hersteller:
OmniVision GmbH
Lindberghstraße 9
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 89 84 07 92-30
Telefax +49 89 84 07 92-40
www.omnivision.de
info@omnivision.de

Vertrieb Österreich:
OmniVision GmbH
Anton Anderer Platz 6
1210 Wien
Österreich
Telefon +43 1 270 70 70
Telefax +43 1 270 70 70 20
www.omnivision.at
info@omnivision.at

06/2015