

## **Gebrauchsanweisung**

1. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten, muss die Haut um das Auge sauber und trocken sein. Die Schutzfolie vom Augenpflaster entfernen.
2. Beide Augen leicht schließen, so dass die Gesichtsmuskeln entspannt sind. Um das Auge sollten sich keine Falten bilden.
3. Opticlude mit der schmalen Seite zur Nase hin aufkleben. Augenpflaster und Haut dürfen nicht gedehnt werden.
4. Opticlude ist mit besonders hautfreundlichem Klebstoff versehen, der seine volle Klebkraft durch leichten Druck entfaltet. Deshalb Opticlude gut anmodellieren und dabei mit den Fingerspitzen leichten Druck auf den Rand ausüben.

**Entfernen:** Das Augenpflaster vorsichtig vom äußeren Rand des Auges in Richtung Nase abziehen. Dabei die Haut mit der anderen Hand unterstützen, damit sie nicht zu starkem Zug ausgesetzt ist.

## **Gebruiksaanwijzing**

1. De huid moet droog en vetvrij zijn. De schutlaag van de oogpleister verwijderen.
2. Het oog enigszins sluiten en de gezichtsspieren ontspannen. Er mogen zich geen rimpels om het oog vormen.
3. Opticlude zonder spanning met de smalle kant richting neus plakken.
4. Opticlude heeft een bijzondere huidvriendelijke kleeflaag die door lichaamswarmte zijn volledige kleefkracht ontwikkelt. Daarom Opticlude goed modelleren (evt. kort de hand opleggen).

**Verwijderen:** Voorzichtig de randen van de oogpleister losmaken en verwijderen in de richting van de neus. Tijdens het verwijderen de huid ondersteunen.